


Sengehest RFM med taske

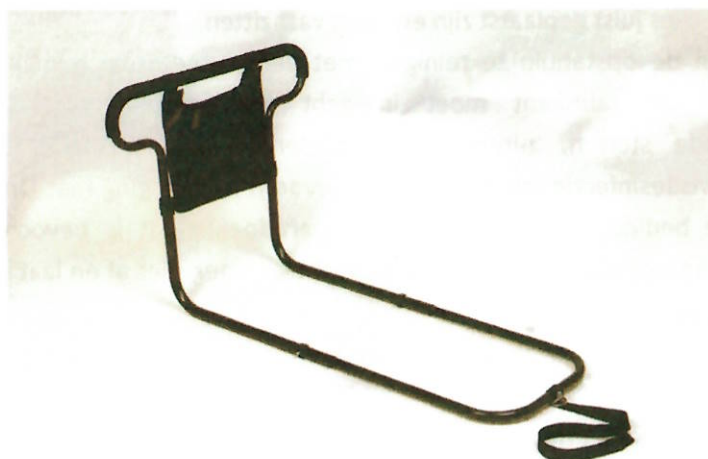

DK



VIGTIGT: Du bedes sørge for, at denne brugervejledning læses grundigt og bliver forstået før brugen. Vejledningen opbevares til fremtidig brug. Tag kontakt til os, hvis du har spørgsmål.

Formål

Denne sengehest er konstrueret til at give stabil støtte og og hjælpe personer med at komme fra en liggende til en siddende position, støtte dem i at komme ind og ud af sengen og til at give ekstra støtte, når man står ved siden af sengen.


Indhold



håndtag x1



L-formet rør x2

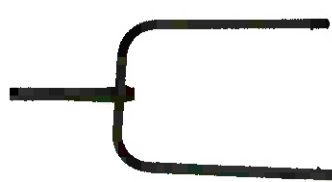

U-formet rør 1x



C-clips 4x



taske 1x


(figur1)

Installationsinstruktion

1. Beskyttelsesposerne fjernes fra rørene.
2. Madrassen fjernes fra sengen.
3. Tasken monteres til sengehestens håndtag og fastgøres med velcrolukningen (se også **figur 2**).



figur 2

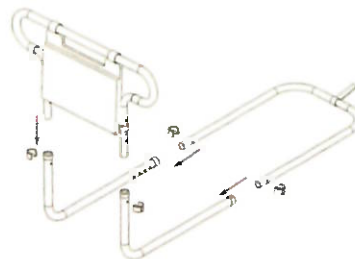

figur 3

4. Håndtaget indsættes i det L-formede rør. Der vælges en passende højde (472-547 mm, 4 positioner kan indstilles) og røret fikseres med en C-clip (medfølger)(se også **figur 3**)


figur 3

5. Det U-formede rør indsættes i det L-formede rør, der vælges en passende længde på sengehesten (872-947mm, 4 positioner kan indstilles) og røret fikseres med en C-clip (se også **figur 3**)

6. Remmen fastgøres til sengen med D-ringen (se også **figur 4**).

7. Madrassen lægges på plads igen.

figur 4

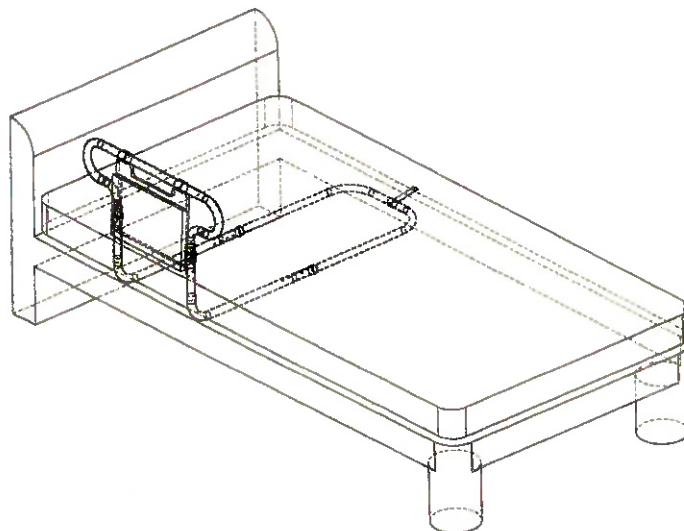

Placering af sengehesten

1. Der **SKAL** være et mellemrum på mindst 250mm fra sengens hovedende til sengehesten.
2. Sengehesten bør placeres i en passende position, så en bruger (som ligger i sengen) er i stand til at tage fat i sengehesten uden at strække sig.
3. En passende position er, hvor sengehesten er fikseret er mellem brugerens hals og hofte, således at brugeren let kan tage fat i sengehesten og komme ud af sengen.
4. Når en sengehest er monteret ved siden af sengen, bør brugeren som ligger i sengen være opmærksom på, at han ligger/sover roligt og ikke bevæger sig frem og tilbage for tit. På den måde

reduceres risikoen for at indklemme hoved/hånd/hofte/ben.

Pleje og vedligehold

1. Sengehesten skal kontrolleres som en del af et planlagt vedligeholdelsesprogram.
2. Brugen af sengehesten skal standses umiddelbart, hvis der er tegn på slid, skader, instabilitet, løst håndtag, etc.
3. Det kontrolleres at sengehesten er korrekt placeret og remmen fastgjort.
4. Det kontrolleres at begge fikserende C-clips er korrekt monterede og sikrede.
5. Rengør overfladerne på opstillingshjælpen med et ph-neutralt rengøringsmiddel. Anvendelsesinstruktionerne specificeret af producenten skal overholdes. Brug ikke slibemidler, ætsende stoffer, syrer, blegemidler eller hårde rengøringsgenstande eller højtryksrensere!
6. Tør desinfektion udføres efter rengøring med Desinfektion af overflader. Vær opmærksom på en fuldstændig befugtning, tør ikke af og lad sengeskinnen tørre i mindst 30 sekunder. Overhold informationerne fra desinfektionsmiddelproducenten.
7. Overfladen må ikke kradses med hårde eller skarpe genstande.



Sikkerhed

1. Denne sengehest er konstrueret udelukkende til voksne, og ikke til børn eller unge
2. Denne sengehest er konstrueret til personer, hvis vægt er under 150 kg (330 lbs)
3. Sengehesten skal altid fikseres til rammen med sikkerhedsremmen
4. Brugeren skal jævnligt kontrollere, at sengehesten er sikkert fikseret og tilstrækkeligt stabil
5. Det skal sikres, at madrassen ligger fast ind mod kanten
6. Dette produkt må ikke bruges med en seng, som sengehesten ikke er konstrueret til.

Produktdata:

Håndtagets bredde: 624 mm

Rækværk bredde: 335 mm

Rækværk længde: 872-947 mm, 4 indstillinger (25.4 mm hver)

Håndtag højde: 472-547 mm, 4 indstillinger (25.4 mm hver)

Lomme (lille) last: 0.5 kg

Lomme (stor) last: 2 kg

Enhedens vægt: 1.4 kg

Materiale: aluminium, EVA-skum (ethylen-vinylacetat-copolymer)



Rehaforum Medical GmbH, Daimlerstraße 12a, DE-25337 Elmshorn

Tel.: +49 (0) 4121-473312, www.rehaforum.com

REF

10012837